

MODE D'EMPLOI

UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE POUR LE MONTAGE DE POCHES GOUTTE À GOUTTE/IV UNE INNOVATION DU NHS



CROCHET EN J

Bleu 15 mm (FKW010) et 21 mm (FKW011)
Utilisé pour suspendre des sacs IV et fluides à un support mural ou à un rail de rideau de 15 mm/21 mm de largeur. J-HOOK peut prendre jusqu'à deux sacs IV, charge maximale de 5 kg, (se brisera sous le poids humain, anti-ligature).

Le crochet peut être nettoyé avec de l'eau et du savon ou une lingette désinfectante comme recommandé par la politique de contrôle des infections de la Trust. Le J-HOOK peut résister à plusieurs cycles de stérilisation effectués à 135°.

Lorsque vous retirez le J-HOOK du rail de rideau, assurez-vous que le J-Hook est SOULEVÉ directement VERS le haut du rail et NON retiré à un angle.



Support mural

Assurez-vous que le texte à l'avant du support est vertical.

Le support mural (FKW016) doit être monté à environ 5,5 pieds sur un mur à partir du sol. Placez un support de chaque côté du lit d'un patient si l'espace le permet et dans la salle de bain/toilettes.

Le support peut être nettoyé avec de l'eau et du savon ou une lingette désinfectante comme recommandé par la politique de contrôle des infections de la fiduciaire

Gamme HOOK-IT®



Instructions de nettoyage

Le produit peut être essuyé avec de l'eau et du savon ou de l'alcool. De plus, le produit peut être autoclavé pour la stérilisation. Le produit peut résister à plusieurs cycles de stérilisation effectués à 135°

Tests de résistance

Le produit peut supporter des charges allant jusqu'à 12,5 newtons, soit l'équivalent de sacs de fluide de 12,5 litres.

Durée de vie du produit

3 ans



EU AR : MDTi Cyprus Ltd, 1 Kalymnou Q MERITO, 4 floor, 6037 Larnaca, Agios Nikolaos, Kamares, Cyprus mares, E-mail : info@mdti.eu



Medical Devices Technology International Ltd (MDTi)

Siège social : The Kace Building, Victoria Passage, Wolverhampton,

West Midlands WV1 4LG, Royaume-Uni

N° de ligne directe +44 (0) 1902 778380

Courriel : info@medti.co.uk

N° d'entreprise 04383577 Wat n° 836853102