

INSTRUCCIONES DE USO

UNA SOLUCIÓN SENCILLA Y EFICAZ PARA EL MONTAJE DE BOLSAS DE GOTEO/INTRAVENOSAS UNA INNOVACIÓN DEL NHS



GANCHO EN J

Azul 15 mm (FKW010) y 21 mm (FKW011)
Se utiliza para suspender bolsas intravenosas y de fluidos de un soporte de pared o de un riel de cortina de 15 mm/21 mm de ancho.
J-HOOK llevará hasta dos bolsas intravenosas, carga máxima de 5 kg (se romperá bajo el peso humano, anti-ligadura).

El gancho se puede limpiar con agua y jabón o toallita desinfectante según lo recomendado por la Política de Control de Infecciones de Trust. El J-HOOK puede soportar múltiples ciclos de esterilización realizados a 135°.

Al retirar el gancho en J del riel de la cortina, asegúrese de que el gancho en J esté LEVANTADO directamente del riel y NO se haya retirado en ángulo.



Soporte de pared

Asegúrese de que el texto en la parte delantera del paréntesis esté en posición vertical.

El soporte de pared (FKW016) debe montarse a unos 5,5 pies en una pared desde el nivel del suelo. Coloque un soporte a cada lado de la cama del paciente si el espacio lo permite y, en el baño/inodoro.

El soporte se puede limpiar con agua y jabón o toallita desinfectante según lo recomendado por la Política de Control de Infecciones de Trust

Gama HOOK-IT®



Instrucciones de limpieza

El producto se puede limpiar con agua y jabón o alcohol. Además, el producto se puede esterilizar en autoclave para su esterilización. El producto puede soportar múltiples ciclos de esterilización realizados a 135°

Pruebas de estrés

El producto puede soportar cargas de hasta 12,5 newtons, lo que equivale a sacos de fluido de 12,5 litros.

Vida útil del producto

3 años



EU AR: MDTi Cyprus Ltd, 1 Kalymnou Q MERITO, 4 piso, 6037 Larnaca, Agios Nikolaos, Kamares, yeguas chipriotas, E-mail: info@mdti.eu



Tecnología Internacional de Dispositivos Médicos Ltd (MDTi)

Domicilio social: The Kace Building, Victoria Passage, Wolverhampton,

West Midlands WV1 4LG, Reino Unido

Línea Directa No. +44 (0) 1902 778380

Correo electrónico : info@medti.co.uk

Compañero No. 04383577 Vat No.

836853102